

ПАСПОРТ на ортопедический матрас

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Аскона-Век»,
601915, Россия,
Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Комсомольская, д. 116-г, строение 25.

ГОСТ 19917-93 п.2.2.15
ТУ 9396-001-54606963-2010



ОДОБРЕНО
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



<http://медифлекс.рф>

8 800 200 40 90

mediflex®

Академик **В.И. Дикуль**
рекомендует



**ИЗДЕЛИЕ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Профессиональная помощь
Вашему позвоночнику

Поздравляем Вас
с покупкой **ортопедического** матраса **Mediflex**,
разработанного совместно
с врачами-ортопедами
под руководством академика В.И. Дикуля.

Специалисты компании "Аскона" гарантируют,
что ортопедический матрас торговой марки
Mediflex, обеспечит физиологически правильное
(ортопедическое) положение тела во время
сна и создает благоприятные условия для
нормального кровоснабжения и снятия
напряжения в спине.

Ортопедический матрас Mediflex предназначен
для лежания в жилых помещениях, является
изделием медицинского назначения и одобрен
Росздравнадзором. Регистрационное
удостоверение ФСР 2011/10351 от 22.03.11.
Противопоказаний не имеет.



mediflex®

mediflex®

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



При транспортировке, хранении и эксплуатации матрас должен находиться в горизонтальном положении на ровной поверхности (ортопедическом основании). Категорически запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрас.



Герметичная упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов (влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как и любая новая вещь). После снятия упаковки, перед эксплуатацией, изделие необходимо проветрить, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха снизится, и он полностью исчезнет через 14 дней.



Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом помещении. Не размещайте матрас рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня.



Используйте матрас на сплошной ровной горизонтальной поверхности или качественном ортопедическом основании с упругими ламелями. Для матраса шириной более 140 см рекомендуется использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой. Не используйте матрас на кровати, размер спального места которой меньше размера матраса.



Запрещается прыгать и ходить по матрасу в том числе и детям.



Переворачивайте матрас (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны) один раз в 1-3 месяца и один раз в год – меняя положение голова-ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.



Ручки выполняют декоративную функцию и не предназначены для переноса и переворачивания двуспальных матрасов.



Берегите матрас от попадания жидкостей и химикатов; возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Сушите матрас на воздухе, не применяя утюга.



Для сохранения чистоты матраса рекомендуется использовать защитные аксессуары – чехлы и наматрасники, которые вы можете приобрести в фирменном магазине «Аскона».

При соблюдении всех рекомендаций минимальный срок службы матраса, в течении которого он сохраняет свои качества и свойства, составляет 10 лет.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Ортопедические матрасы Mediflex, произведены компанией Askona, гарантируют профессиональную помощь Вашему позвоночнику в течение 5 лет.
- Изготовитель гарантирует соответствие матраса Mediflex ГОСТ 19917-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий эксплуатации.
- В случае признанного изготовителем производственного брака в течение гарантийного срока Вы имеете право на замену или бесплатный ремонт изделия.
- Все претензии по качеству принимаются при наличии вшивной этикетки на изделие, содержащей его индивидуальный штрих-код.
- Гарантия предоставляется при условии отсутствия на матрасе загрязнений, механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.
- Гарантия не распространяется на дефекты, относящиеся к естественному износу материалов матраса.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к представителю компании Аскона, у которого Вы приобрели матрас и в центр обслуживания клиентов по телефону **8-800-200-40-90**.
- Свои вопросы, замечания и предложения, а в том числе и отзывы о качестве обслуживания торговым персоналом, Вы можете отправить по электронной почте на адрес производителя: client@askona.ru.

Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и ощущениями, полученными от выбора, приобретения и отдыха на ортопедических матрасах оставив сообщение на сайте: <http://медифлекс.рф>

Мы будут очень признательны
за оказанное внимание
и предоставленную информацию