


 askona

fitness

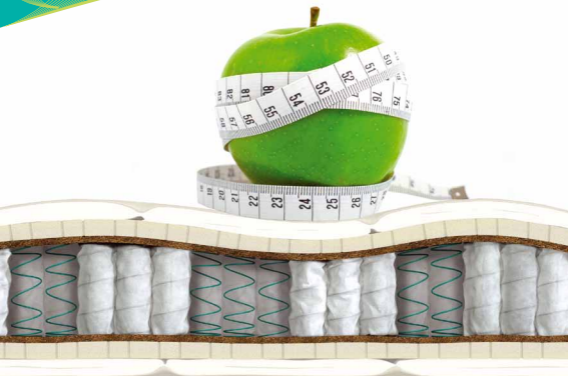

**Ортопедические матрасы для активной жизни!**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТРАСОВ**

**ГАРАНТИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ**

**для коллекций матрасов Askona Fitness**

Нам очень приятно,  
что Вы остановили свой выбор  
на ортопедических матрасах  
компании ASKONA.

Наши специалисты гарантируют, что выбранный Вами ортопедический матрас, обеспечит физиологически правильное (ортопедическое) положение тела во время сна и создает благоприятные условия для нормального кровоснабжения и снятия напряжения в спине.

Ортопедический матрас ASKONA предназначен для лежания в жилых помещениях, является изделием медицинского назначения и одобрен Росздравнадзором. Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11665 от 17.08.11. Противопоказаний не имеет.



**БЛАГОДАРИМ ЗА  
ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ!**




### Пружинный блок FZ - 1400

Fitness Zoned 1400 состоит из 5 зон. Сочетание пружин с разным уровнем жесткости создает анатомически правильную поддержку позвоночника.

### Пружина «песочные часы»

Запатентованная пружина «песочные часы» лежит в основе зон, призванных обеспечивать поддержку наиболее тяжелых областей тела человека.

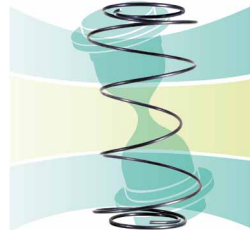



При транспортировке, хранении и эксплуатации матрас должен находиться в горизонтальном положении на ровной поверхности (ортопедическом основании). Категорически запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрас.



Герметичная упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов (влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие необходимо проветрить, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха снизится, и он полностью исчезнет через 14 дней.



Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом помещении. Не размещайте матрас рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня.



Используйте матрас на сплошной ровной горизонтальной поверхности или качественном ортопедическом основании с упругими ламелями. Для матраса шириной более 140 см рекомендуется использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой. Не используйте матрас на кровати, размер спального места которой меньше размера матраса.



Запрещается прыгать и ходить по матрасу, в том числе и детям.



Переворачивайте матрас (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны) один раз в 1-3 месяца и один раз в год – меняя положение голова-ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.



Ручки выполняют декоративную функцию и не предназначены для переноса и переворачивания двуспальных матрасов.



Берегите матрас от попадания жидкостей и химикатов; возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Сушите матрас на воздухе, не применяя утюга.



Не пренебрегайте информацией по рекомендуемой нагрузке на одно спальное место и советами продавца.



Для сохранения чистоты матраса рекомендуется использовать защитные аксессуары – чехлы и наматрасники, которые вы можете приобрести в фирменном магазине «Аскона».



**При соблюдении всех рекомендаций минимальный срок службы матраса, в течении которого он сохраняет свои качества и свойства, составляет 10 лет.**

В случае признанного изготовителем производственного брака в течение гарантийного срока Вы имеете право на замену или бесплатный ремонт изделия.

Гарантия на матрасы askona fitness – до 5 лет.

Производитель гарантирует исправную работу и выполняет гарантийные обязательства при условии полного соблюдения требований инструкции по эксплуатации.

#### Гарантия действительна:

при сохранении вшитой в торец матраса этикетки, содержащей индивидуальный штрих-код матраса;

- если матрас не имеет механических повреждений, загрязнений, следов самостоятельного ремонта;

- дополнительная гарантия (свыше 18 месяцев) не распространяется на дефекты, относящиеся к естественному износу материалов и не влияющие на эксплуатационные характеристики.

Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и пожеланиями в адресной форме на корпоративном сайте компании [www.askona.ru](http://www.askona.ru) или по адресу электронной почты: [client@askona.ru](mailto:client@askona.ru)

Коллектив компании будет очень признателен Вам за оказанное внимание и предоставленную информацию.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к дилеру компании «Аскона» и в центр обслуживания клиентов по телефону **8-800-200-40-90**.





**Продукция компании «Аскона»  
соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15**

Производитель: ООО «Аскона - Век»  
601915, РФ, Владимирская обл.,  
г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-г, стр. 25  
ТУ 9396-002-5406963-2011

**8 800 200 40 90**

**[www.askona.ru](http://www.askona.ru)**